

**Laringospray**  
**Izsmidzināms līdzeklis**  
Medicīniskās ierīces lietošanas instrukcija

**Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.**

Vienmēr lietojiet **Laringospray** tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.


**Sastāvs:** Propolisa šķīdums etilspirtā, kliņģerītes ziedu tinktūra, attīrīts ūdens, glicerīns.

**Iedarbība un pielietojums:** **Laringospray** ir uz spirta pamatnes veidots izsmidzināms līdzeklis, ko lieto, lai atvieglotu mutes dobuma un rīkles gala gļotādas kairinājumu pēc dažādu manipulāciju veikšanas vai iekaisumu gadījumos. Sastāvā esošais propoliss ir viens no visplašāk lietotajiem biškopības produktiem ārstniecībā, kuram piemīt pretmikrobu, pretvēģu un pretvīrusa iedarbība. Līdzeklis pārklāj gļotādas virsmu, tādējādi aizkavējot mikroorganismu piekļūšanu un savairošanos, palīdzot uzturēt labvēlīgu mikroviidi, pasargājot no kairinājuma un radot nepieciešamos apstākļus gļotādas atjaunošanai, lai tā var labāk pildīt savas funkcijas.


Smidzinātāja forma nodrošina vienmērīgu līdzekļa nokļūšanu uz gļotādas un precīzu devu.

Produkts paredzēts kā profesionālai, tā arī pašlietošanai.


**Kā lietot Laringospray**

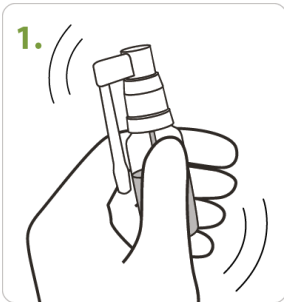


1. Saskalojiet pudelīti.

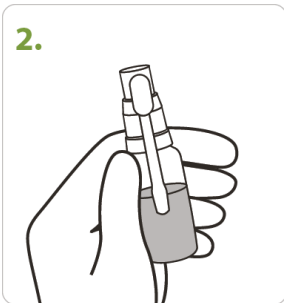

2. Paņemiet rokā pudelīti ar izsmidzinātāju pret sevi.

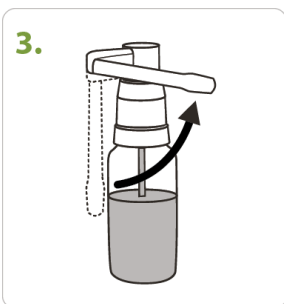

3. Pagrieziet izsmidzinātāja uzgali pretēji pulksteņrādītāja virzienam 90 grādu leņķī.

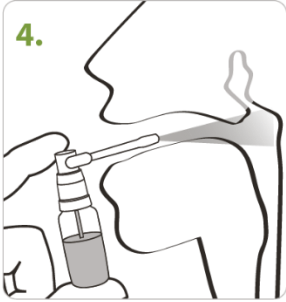

4. Ievietojiet izsmidzinātāju mutē kā norādīts zīmējumā.
5. Pirmo reizi izsmidziniet **Laringospray** mutes dobumā, 2-3 reizes nospiežot smidzinātāja uznavu. Turiet pudelīti vertikāli! Nospiežot smidzinātāja uznavu vienu reizi tiek izsmidzināts aptuveni 150 mg līdzekļa.
6. Pēc lietošanas, notīriet smidzinātāju ar papīra salveti un pagrieziet smidzinātāja uzgali atpakaļ sākuma pozīcijā.

### **Līdzeklis paredzēts vienas personas lietošanai.**

Lieto līdz 3 reizēm dienā. Lai nodrošinātu ilgstošāku pārklājošo efektu, nav vēlams lietot līdzekli ēšanas un dzeršanas laikā.

Līdzekli lieto līdz mutes dobuma un rīkles gala gļotādas kairinājumu un iekaisumu simptomu izzušanai, tomēr, ja simptomi (diskomforta sajūta) pēc nedēļu ilgās lietošanas saglabājas, vēlams konsultēties ar ārstu.

**Piesardzība lietošanā:** Nelietojiet, ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret bišu produktiem vai citām līdzekļa sastāvdaļām.

Nepieļaut līdzekļa iekļūšanu acīs! Ja līdzeklis nejauši iekļūst acīs, atvērtas acis nekavējoties izskalot ar tekošu ūdeni un konsultēties ar ārstu.

Dati par lietošanu bērniem līdz 12 gadu vecumam un sievietēm grūtniecības vai zīdīšanas laikā ir ierobežoti, tādēļ lietot tikai pēc ārsta konsultācijas.

Nav novērotas blakusparādības, ko izraisījusi **Laringospray** lietošana.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

**Uzglabāšana:** Sausā, bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Glabāt rūpīgi noslēgtā oriģinālā iepakojumā, istabas temperatūrā (15-25 °C). Pēc lietošanas uzsākšanas izlietot 3 mēnešu laikā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

**Ražotājs:** SIA „SILVANOLS”, Kurbada iela 2a, Rīga, LV – 1009, Latvija.

[www.silvanols.lv](http://www.silvanols.lv)

**Iepakojumā:** 20 ml pudelīte ar izsmidzinātāju.