

FarinGospray apelsīnu
Izsmidzināms līdzeklis
Medicīniskās ierīces lietošanas instrukcija

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.


Vienmēr lietojiet **FarinGospray apelsīnu** tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Sastāvs: Augu eļļa, smiltsērķšķa eļļa (*Oleum Hippophaes*), kliņģerītes ziedu eļļas ekstrakts (*Oleum Calendulae*), apelsīnu eļļa (*Oleum Aurantii dulcis*) un rozmarīna ekstrakts (*Extractum Rosmarini*).


Iedarbība un pielietojums: **FarinGospray apelsīnu** ir uz eļļas pamatnes veidots līdzeklis, kura sastāvā esošās dabīgās eļļas pārklāj mutes dobuma un rīkles gala gļotādu. Tas palīdz uzturēt gļotādu mitru un elastīgu, mazina diskomforta sajūtu un sāpes, samazina skrāpēšanas sajūtu kaklā un berzi, tādējādi atvieglojot arī ēdiena kumosu norīšanu.

Līdzekli lieto, lai atvieglotu mutes dobuma un rīkles gala gļotādas kairinājumu pēc dažādu manipulāciju veikšanas vai iekaisumu gadījumos.


Kā lietot FarinGospray apelsīnu

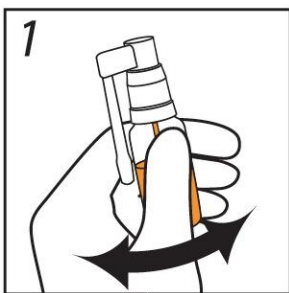


1. Saskalojiet pudelīti.

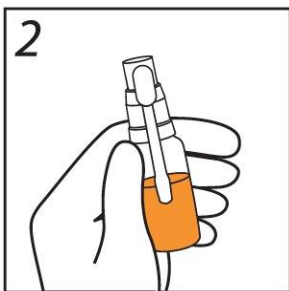

2. Paņemiet rokā pudelīti ar izsmidzinātāju pret sevi.

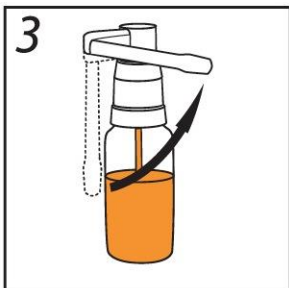

3. Pagrieziet izsmidzinātāja uzgali pretēji pulksteņrādītāja virzienam 90 grādu leņķī.

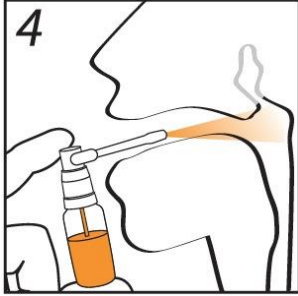

4. Ievietojiet izsmidzinātāju mutē kā norādīts zīmējumā.
5. Pirmo reizi izsmidziniet **FarinGospray apelsīnu** mutes dobumā 2-3 reizes nospiežot smidzinātāja uznavu. Turiet pudelīti vertikāli!
Nospiežot smidzinātāja uznavu vienu reizi tiek izsmidzināts aptuveni 200 mg līdzekļa.
6. Pēc lietošanas, notīriet smidzinātāju ar papīra salveti un pagrieziet smidzinātāja uzgali atpakaļ sākuma pozīcijā.

Līdzeklis paredzēts vienas personas lietošanai.

Lietot 3 reizes dienā. Lai nodrošinātu ilgstošāku pārklājošo efektu, nav vēlams lietot līdzekli ēšanas un dzeršanas laikā.

Līdzekli lieto līdz slimības simptomu izzušanai, tomēr, ja simptomi (diskomforta sajūta, sāpes kaklā) pēc nedēļu ilgas lietošanas saglabājas, vēlams konsultēties ar ārstu.

Uzmanību! Saskaņojiet ar apģērbu var rasties traipi.

Piesardzība lietošanā: Nelietojiet, ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret kādu no līdzekļa sastāvdaļām. Nepieļaut līdzekļa iekļūšanu acīs! Ja līdzeklis nejauši iekļūst acīs, atvērtas acis nekavējoties izskalot ar tekošu ūdeni un konsultēties ar ārstu. Var lietot bērniem no 2 gadu vecuma, bērniem līdz 6 gadiem lietot vecāku uzraudzībā.

Nav novērotas blakusparādības, ko izraisījusi **FarinGospray apelsīnu** lietošana.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Uzglabāšana: Sausā, bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Glabāt rūpīgi noslēgtā oriģinālā iepakojumā, istabas temperatūrā (15-25 °C). Pēc lietošanas uzsākšanas izlietot 3 mēnešu laikā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

Ražotājs: SIA „SILVANOLS”, Kurbada 2A, Rīga, LV-1009, Latvija.
www.silvanols.com

Iepakojumā: 20 ml pudelīte ar izsmidzinātāju.